

VITAMINA C (Ácido ascórbico) T885-EDTA K3 3mL SUB -20° LUZ (Vit C)

PROTEGER DE LA LUZ



- 1- Centrifugar la muestra.
- 2- Añadir 0,50 mL de muestra de plasma al tubo suministrado por CERBA que contiene 0,50 mL de solución al 10% de ácido perclórico con un 1% de meta fosfórico.
- 3- Congelar la muestra.

SUERO CONGELADO (T126-SUERO 5mL SUB -20° CONGELADO)

Pruebas:

- Gastrina
- Amonio
- CH50
- Cribado 1er trimestre embarazo

VITAMINA C (Àcid ascòrbic) T885-EDTA K3 3mL SUB -20° LLUM (Vit C)

PROTEGIU DE LA LLUM



- 1- Centrifugueu la mostra.
- 2- Afegiu 0,50 mL de mostra de plasma al tub subministrat per CERBA, que conté 0,50 mL de solució al 10% d'àcid perclòric amb un 1% de meta fosfòric.
- 3- Congeleu la mostra.

SÈRUM CONGELAT (T126-SUERO 5mL SUB -20° CONGELAT)

Proves:

- Gastrina
- Amoni
- CH50
- Cribratge 1er trimestre embaràs